

BA-Nr.: 01.08.042/2016-12



REBOTEC® Rehabilitationsmittel GmbH
DE-49610 Quakenbrück, Artlandstr. 57-59
Telefon : 05431/9416-0
Telefax : 05431/9416-66
<http://www.rebotec.de>
E-Mail: info@rebotec.de



Bedienungsanleitung

Duschhocker


“ROM”

Art. Nr.: 368.00.10



“TURIN”

Art. Nr.: 368.00.20

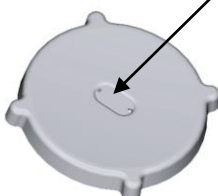

Duschhocker nur mit dieser
Verschlusskappe verwenden!
„Gemäß DIN EN 12182“


Verwendungszweck

Die Duschhocker finden ihre Anwendung im häuslichen und im stationären Bereich. Er dient bei physischer Funktionseinschränkung der Erhöhung der Selbstständigkeit bei der Duschbenutzung. Trotz optimalen Sitzkomforts ist der Hocker für längeres Sitzen nicht geeignet.

Lassen Sie sich von Ihrem Fachhändler oder Pflegepersonal in die Benutzung des Hockers einweisen und deren funktionsgerechte Einstellung vornehmen!

Inbetriebnahme

Der Duschhocker ist gebrauchsfertig. Für die Inbetriebnahme des Hockers „Turin“ sind folgende Handhabungen zu beachten:

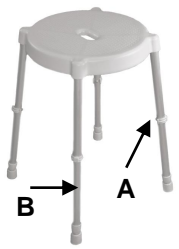

Modell „Turin“ (Hockerbeine höhenverstellbar):

- Den Clip (A) durch abziehen demontieren.
- Das Innenrohr (B) in die gewünschte Höhe einstellen.
- Clip (A) wieder montieren.

Sturzgefahr! Achten Sie darauf, dass alle vier Hockerbeine gleich hoch eingestellt sind.

Pflege und Wartung

Alle Kunststoffteile können mit einem handelsüblichen Kunststoffreiniger gereinigt werden. Beachten Sie deren Produktinformation.

Bei den Aluminiumrohren ist in den meisten Fällen ein feuchtes Abwischen und anschließendes Trockenreiben völlig ausreichend.

Überprüfen Sie vor jeder Benutzung die Standsicherheit des Produktes. Bei Beschädigungen das Produkt umgehend überprüfen lassen. Zur Instandsetzung des Produktes wenden Sie sich an einen Fachhändler. Nur Original-REBOTEC Ersatzteile verwenden.

Lassen Sie den Hocker mindestens einmal jährlich von einem Fachhändler überprüfen.

Wiedereinsatz

Das Produkt ist für den Wiedereinsatz bestimmt. Der Wiedereinsatz (Lebensdauer) ist abhängig vom Produktzustand. Vor dem Wiedereinsatz ist bei dem Produkt eine Wartung durchzuführen und die entsprechenden Anweisungen zu Sicherheit, Pflege und Wartung sind zu beachten und einzuhalten.

Diese Überprüfung soll eine unsachgemäße Benutzung durch mögliche oder direkt erkennbare Schäden ausschließen. Wir verweisen hier auf das Medizinproduktgesetz (MPG) und die Betreiberverordnung (MPBetreibV).

Lebensdauer

Die zu erwartende Lebensdauer der in dieser Bedienungsanleitung aufgeführten Produkte beträgt bei bestimmungsgemäßen Gebrauch, Einhaltung der Sicherheitshinweise, Wartungsintervalle und Pflegehinweise **3 Jahre**.

Über diesen Zeitraum hinaus kann das Produkt nur in einem sicheren Produktzustand weiter verwendet

werden. Eine Wartung sollte dann mindestens jedes halbe Jahr erfolgen. Besondere Anforderungen an das Produkt, bedingt durch die Nutzung des Patienten, können kürzere Wartungsintervalle hervorrufen.

Gewährleistung

Auf die in dieser Bedienungsanleitung aufgeführten Produkte geben wir eine Garantie von **24 Monaten**.

Hiervon sind alle Verschleißteile ausgeschlossen, so wie Schäden bei nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch des Produktes.

Sicherheitshinweise

- **Beachten Sie das auf dem Produkt angegeben maximale zulässige Körpergewicht!**
- **Überprüfen Sie vor jeder Benutzung den Hocker auf Beschädigungen. Sollten Schäden erkennbar sein, nehmen Sie den Hocker nicht in Gebrauch.**



Achtung! Sturzgefahr

- Vor Benutzung folgende Punkte unbedingt prüfen:
 - ✓ Sitzplatte auf festen Halt
 - ✓ Standfestigkeit des Hockers
 - ✓ Clip (bei Turin) für die Höhenverstellung
- Den Duschhocker nicht mit dem Benutzer tragen.
- Den Duschhocker nur im Innenbereich und auf ebenen Untergrund benutzen.
- **Nach längerer Nichtbenutzung:** Duschhocker durch Fachpersonal überprüfen lassen.

Entsorgung

Nicht mehr gebrauchsfähige Produkte sind gemäß den nationalen und örtlichen Vorschriften für Umweltschutz und Rohstoffrückgewinnung getrennt vom regulären Hausmüll zu entsorgen. Erkundigen Sie sich bei einem Entsorgungsunternehmen.

Hinweis !

Die Bedienungsanleitung für spätere Verwendung aufbewahren. Bei Beanstandungen oder Rückfragen geben Sie bitte die Art. Nr., Typ und die BA-Nr. an.

Technische Daten

Art.-Nr.	Typ	Maße/ in cm; C / D / F	Gewicht	max. Körperlast
368.00.10	Rom	50 / 32 / 37,5x37,5	1,3kg	100kg
368.00.20	Turin	46-63,5 / 32/ 43,5x43,5	1,6kg	100kg

C=Höhe, D=Fläche, F=Stellfläche

Technische Änderungen vorbehalten!

