

# Gebrauchsanweisung

**Nachrüstsatz für Bettverlängerung  
 Pflegebetten Typ : 1-25  
 Zubehör ET1**



Artikel - Nr.: 1-3910100-05

Version 01.0  
 März 2004

Müller Kranken- und Pflegeeinrichtungen  
 Werner Mühle GmbH  
 Oststraße 26


51766 Engelskirchen  
 Tel.: 02263 / 9617-0 Fax.: 02263 / 9617-50  
[www.muehle-mueller.de](http://www.muehle-mueller.de) [info@muehle-mueller.de](mailto:info@muehle-mueller.de)

Nachrüstsatz für nachträgliche Bettverlängerung

-passend für Pflegebetten Modell  
 1-254123-05V und 1-254023-05V


bestehend aus:

- 4x Seitengitterholme für Liegefläche 220cm  
 (nach Buche hell)
- 1x Ausgleichsgitter (kunststoffbeschichtet hellleifenbein nach RAL 1015)
- 1 x Polsterausgleichsstück

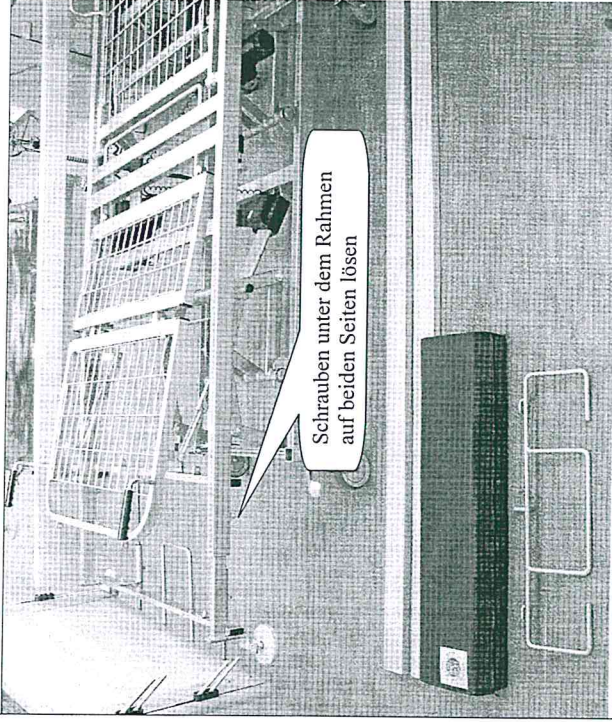

Vorgehensweise:

1. Fußteil lösen ( 2 x 2 Schrauben )
2. Schrauben unter dem Rahmen auf beiden Seiten lösen
3. Seitengitterholme ausschütten
4. Fußteil ausziehen.
5. Schrauben auf beiden Seiten anziehen.
6. Ausgleichsgitter einhängen
7. Seitengitterholme 220cm einschienen
8. Schrauben am Fußteil anziehen.

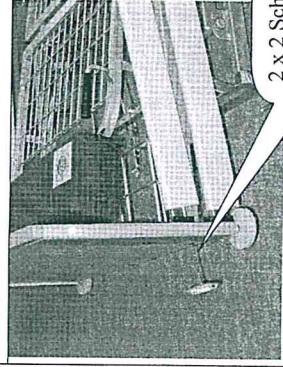

2 x 2 Schrauben zur Befestigung des Fußteils am Liegeflächenrahmen